

車いす用 酸素カートキャリア

ボンベ楽Ⅱ

ラック

ツ

取り付け
ラクラク

車イスに
カンタン
後付け

安心
安全

外出が
スムーズに

携帯用酸素ボンベを
カートまるごと車いすにセット


福祉用具
レンタルの対応の
ご相談ください。

ボンベ楽Ⅱはナンブが在宅酸素のサービス提供を行う中、患者さまの困りごとやお悩みに際して、実際の使用者から様々な意見を聞いて開発しました。


こんなお悩みや不便を 「ボンベ楽Ⅱ」が解決します。



酸素カートを引いての
外出は大変で危険

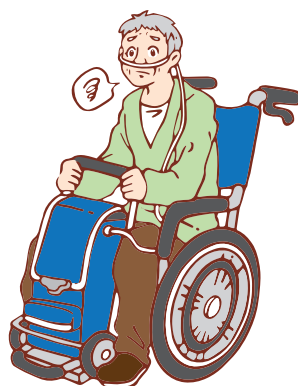

股の間の収納は
狭くて不便

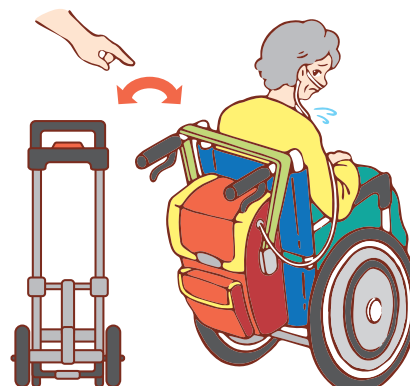

背面掛けは着脱に
手間がかかる

酸素カートをまるごと車イスにセット



そのまま折り
たためます



安心
安全

簡単
後付け

取り付け
楽々

ボンベ楽Ⅱの特徴

既存の車いすに
加工不要で簡単に
後付けできます。

ボンベ楽Ⅱを取り
付けたまま車いす
を折りたためます。

多種類の酸素カート
に対応しています。

ワンタッチで酸素カー
トの取り付け・取り外
しが可能です。

ボンベ楽Ⅱの取り付け方法

台座プレートに 酸素カートをのせて ベルトで固定するだけ！

カートの取り付け・
取り外しはワンタッチ

介助者の酸素カート
けん引が不要で外出も楽々

セットが
カンタンで
助かるわ

一人でも
外出できるわ



携帯用酸素ボンベカートの
ほかに携帯用酸素濃縮装置の
カートなども搭載可能。



1 ティッピングレバーに台座
プレートを固定し、持ち手
に固定ベルトを装着



固定ベルト



台座プレート

取り付けしやすい蝶ねじタイプ

2 固定した台座プレートの
上に酸素カートを取り付け



3 固定ベルトで酸素カートの
持ち手を固定





今まで取り付けできなかった車イスへの対応※1

専用工具なしでも取り付けられる留め具へ変更

※1.ボンベ楽Ⅱは、ボンベ楽では取り付けのできなかったより多くの車椅子に対応できるように仕様変更を行っておりますが、すべての車椅子に取り付けができるわけではございません。ご了承ください。



※本商品に、●車イス ●酸素カート ●ボンベバッグは含まれておりません。


介護保険特定福祉用具
介護保険
貸与対象商品

車いす用 酸素カートキャリア


TAISコード 01360-000002

ボンベ楽Ⅱ (ラック) **30,000円(税別)**


セット内容

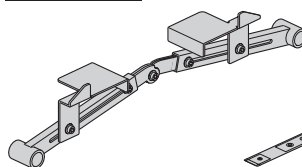

台座プレート付ラック 1個

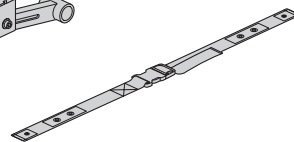

固定ベルト 1本

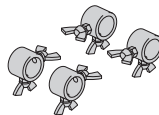


留め具 4個

※付属でスパナ(8mm/10mm)、六角レンチ(5mm)が各1本付きます

【取り付け可能な車いす】

●自走式または介助用の車いすで、ティップングレバーのあるもの ●ティップングレバーの直径が17mm以上22mm以下、長さが80mm以上あるもので、左右のティップングレバーの内側の幅が320mm以上415mm以下のもの ●ティップングレバーとバックレストパイプの角度が直角(90度)のもの

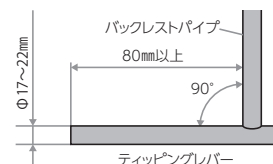

【販売店】

【製造販売元】



株式会社 **ナambu**

〒444-0840 岡崎市戸崎町字牛轡10番地91
TEL.0564-64-0200(代) FAX.0564-64-0201
<https://www.nambu-y.jp/>

販売店や商品の
詳しい情報はQRコードを
読み込んでください。

